



IGIENE ORALE

Varios Combi Pro



Due sistemi di profilassi in uno

Combinazione del trattamento di scaling ad ultrasuoni e del trattamento di profilassi Air polishing per un'efficace igiene orale e controllo del biofilm.



Sistema innovativo che permette di combinare insieme due applicazioni in modo sicuro ed efficace

Due sistemi in uno

NSK ha abbinato il trattamento ad ultrasuoni e quello Air polishing in un'unica unità di trattamento professionale. Questo permette di risparmiare tempo e spazio e di ottimizzare le diverse procedure.

Impostazione automatica delle funzioni di trattamento Air polishing per applicazioni sopragengivali e sottogengivali

Collegando il serbatoio della polvere, l'unità seleziona automaticamente le funzioni per applicazioni sopragengivali e sottogengivali, evitando così possibili errori di selezione.

Unità e serbatoio indipendenti

Il serbatoio e il manopolo sono amovibili, permettendo così un facile cambio dalla funzione sopragengivale a quella sottogengivale. Semplice utilizzo e manutenzione agevolata.

Separazione delle polveri

Il sistema con serbatoi, manopoli e cordini separati, indipendenti per procedure sopragengivali e sottogengivali, elimina il rischio che le polveri si mischino tra loro o penetrino all'interno dell'unità di controllo.

Praticità di utilizzo ottimizzata

Cambio automatico della modalità

Passaggio automatico dalla modalità ad ultrasuoni a quella Air polishing attraverso un sensore di riconoscimento che si attiva al sollevamento del manipolo dal suo supporto.



<Funzionamento ultrasuoni>



<Funzionamento polvere>

Memorizzazione delle impostazioni precedenti

La memoria del sistema può archiviare i parametri di trattamenti, come il volume dell'acqua, la pressione dell'aria e il livello di potenza degli ultrasuoni. Per cambiare le impostazioni è sufficiente sollevare il manipolo.

*Per le funzioni Air polishing, le impostazioni cambiano quando si sostituisce il serbatoio.



<Applicazione sopragengivale>



<Applicazione sottogengivale>

Funzione autopulizia

La funzione autopulizia pulisce lo strumento e le manichette dopo il trattamento a mezzo polvere o ultrasuoni. Durante il ciclo di pulizia, il display mostra il tempo rimanente per portare a completamento il processo, che dura circa 45 secondi.



Pedale di controllo multifunzione

Approfondite ricerche sul movimento del piede e sulla sensibilità sensoriale hanno contribuito alla progettazione del pedale di controllo multifunzionale, per offrire all'operatore la possibilità di utilizzare l'apparecchio senza mani e senza interruzioni. Utilizzando solo il piede, l'operatore può attivare o disattivare le diverse funzioni e modificare le impostazioni di potenza. Il pedale è dotato di un'apposita staffa per consentire lo svolgimento delle attività senza mani.



ULTRASUONI

Manipolo LED sottile e altamente ergonomico

Grazie alla punta sottile di $\varnothing 9,5$ mm, il manipolo Varios2 LUX è semplice da utilizzare in tutta la cavità orale. Il manipolo sottile facilita l'approccio fluido alle zone di difficile accesso, come quella dei molari. Tutto questo consente libertà di movimento nella cavità orale e alla punta di essere posizionata all'angolo corretto. Il manipolo ultraleggero e di facile presa riduce lo sforzo sulle mani e sulle dita. L'ampio spettro di illuminazione a LED molto simile alla luce naturale, rende la visione sempre nitida ed elevata la capacità di rilevamento.



Un'ampia gamma di punte

NSK offre più di 80 punte per ottimizzare il trattamento in varie procedure cliniche.

iPiezo engine®

L'esclusivo motore ad ultrasuoni AI reagisce in modo intelligente alle condizioni della superficie dentale

"Vorrei essere più bravo nello scaling", "Vorrei ci fosse un modo più facile per rimuovere i depositi". Abbiamo considerato attentamente le opinioni dei medici nello sviluppo del nostro motore ad ultrasuoni AI unico e di nuova generazione, elemento centrale della serie ad ultrasuoni NSK. Le azioni dell'operatore sono trasmesse con precisione alla punta, come se questa fosse un'estensione della mano. Questo permette di adeguare il trattamento alle condizioni della superficie dentale. Il risultato è un trattamento più rapido e più delicato per i pazienti e allo stesso tempo eco-compatibile, in quanto funziona in modo efficiente con un basso consumo energetico.

Funzione Feedback

Fornisce la potenza appropriata alla punta a seconda delle condizioni della superficie del dente. iPiezo engine emette una frequenza stabile evitando le cadute di tensione, anche con tartaro duro.


Funzione Auto Tuning

Assicura la stabilità della frequenza in uscita adattandola automaticamente al carico necessario per ogni tipo di punta.

Ciò permette l'impostazione di una potenza ottimale per trattamenti efficaci.

Garantisce uno scaling regolare

Gli ablatori a ultrasuoni convenzionali perdono potenza nel momento in cui si passa dal tartaro morbido al tartaro duro. Il carico all'estremità della punta viene rilevato automaticamente dall'azione del motore iPiezo che consente uno Scaling costante, senza perdita di potenza.

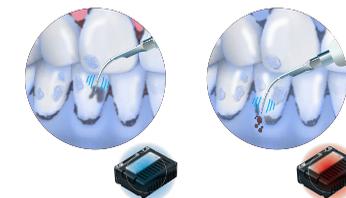




POWDER PROPHY-SYSTEM

Tattamento con polvere per pulire le zone sopragengivali in modo rapido ed efficace



Emissione polvere costante

L'esperienza acquisita da NSK nella fluidodinamica durante la progettazione e sviluppo delle turbine, sfrutta al meglio il getto della polvere all'interno della camera, ottimizzando l'emissione di polvere, acqua ed aria, al fine di diminuire i tempi delle sedute.

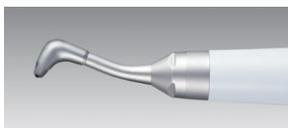

Manipolo e puntale di facile utilizzo

Il manipolo sottile consente di accedere alla cavità orale in modo estremamente facile e pratico. Il puntale, lungo e compatto, permette di raggiungere più facilmente i molari, riducendo così il disagio del medico e del paziente grazie all'eliminazione di inutili tensioni delle labbra e delle guance e garantendo al tempo stesso una buona visuale dell'area di intervento.




Tattamento rapido ed efficace

Utilizzo della polvere FLASH pearl di NSK. FLASH pearl di NSK è formata da sottili particelle sferiche a base di calcio in grado di rimuovere le macchie e la placca.



POWDER PERIO-SYSTEM

Il getto spray della polvere pulisce delicatamente le zone sottogengivali

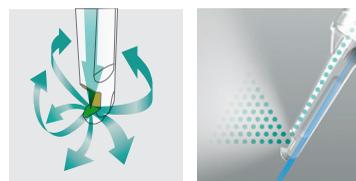

Delicato sui tessuti molli

La separazione della polvere dall'acqua durante l'applicazione previene eventuali danni parodontali. Il getto di polvere viene erogato in tutte le direzioni per una precisa rimozione della placca sottogengivale.



Beccuccio sicuro in plastica

Grazie alla sua flessibilità, il beccuccio può seguire il contorno del dente e penetrare nelle tasche gengivali minimizzando così il disagio del paziente. È costruito in materiale semitrasparente garantendo un'ampia visibilità. I beccucci monouso sono confezionati singolarmente e assicurano sicurezza e facilità d'utilizzo.

Ampia gamma di applicazioni

Le applicazioni variano dalla rapida rimozione del biofilm dentale alla pulizia intorno agli impianti e nelle tasche parodontali. Togliendo il beccuccio, il medico può rimuovere la placca dalle tasche sottogengivali penetrando fino a 3 mm di profondità.

Varios Combi Pro



Varios Combi Pro Set base

MODELLO	CODICE
Varios Combi Pro Set base	Y1002843

Contenuto

- Manipolo PROPHY con puntale 60°
- Cordone PROPHY • Serbatoio PROPHY
- FLASH pearl (5 bustine da 15 gr cad)
- kit di manutenzione • Manipolo VA2LUX
- Cordone VA2LUX • 3 punte Scaling (G4, G8, G16)
- Cassetta di sterilizzazione
- Serbatoio per irrigazione (400 ml) • Pedale

Specifiche tecniche

- Alimentazione: AC 100V-240V 50/60 Hz
- Frequenza: 28-32 KHz
- Dimensioni: L225 x P290 x H162 (mm) compreso serbatoio
- Peso unità: 2.7 kg (senza cordone)
- Volume serbatoio: 400 ml

SISTEMA PERIO opzionale



MODELLO	CODICE
Varios Combi Pro Perio Set	Y1003042

Contenuto

- Serbatoio PERIO • Cordone PERIO
- Manipolo PERIO • Puntale Perio-Mate
- Beccucci Perio-Mate
- Polvere Perio-Mate



Varios 970

Il design compatto ed elegante dalle prestazioni elevate

Ampio display LED

Tutti i parametri di funzionamento sono ben visibili sul display LED e possono essere controllati tramite pulsanti di comando facilmente identificabili.



Grandi serbatoi

I due serbatoi possono essere posizionati e rimossi facilmente e possono essere utilizzati per qualsiasi tipo di irrigazione a complemento del trattamento. I serbatoi grandi da 400 ml offrono un'ampia capacità di irrigazione e tempi di permanenza in poltrona ridotti. Test ripetuti dei nostri componenti e materiali garantiscono un'elevata durabilità anche in caso di utilizzo prolungato con soluzioni di irrigazione antisettica.



Maggiore durata contro le soluzioni antisettiche

L'introduzione del tubo dell'acqua a base di resina del serbatoio, pompa e manipolo, assicura una durata notevolmente superiore in quanto riduce sensibilmente la corrosione e la ruggine causata dal residuo di soluzioni antisettiche.



Modalità autopulente

Pulizia della pompa, del manipolo e delle punte dopo l'utilizzo di soluzioni antisettiche specifiche.



Varios 970 Set completo

Con luce	MODELLO	CODICE
●	VA970 LUX	Y1004161
—	VA970	Y1004160

Contenuto

- Unità di controllo • Manipolo • Cordone • 3 punte Scaling (G4, G6, G8) • Pedale di controllo (FC-70) • 2 serbatoi
- Chiave dinamometrica con limitatore di Torque (3 pz) • Cordone AC • Cassetta di sterilizzazione

Specifiche tecniche

- Alimentazione: AC 230V 50/60 Hz
- Frequenza: 28-32 KHz
- Potenza max in uscita: 11 W (modalità G)
- Dimensioni: L160 x P135 x H65 (mm) (compreso serbatoio)
- Peso unità: 2.1 kg (escluso attacco)
- Volume serbatoio: 400 ml (x 2)

Varios 570

Ablatore ultrasonico multifunzionale compatto e versatile

Varios 570 offre tre modalità di potenza selezionabili in base all'applicazione desiderata: "G" (Generale), "E" (Endodonzia) e "P" (Perio). Il livello di potenza può essere regolato per ogni modalità. Inoltre, selezionando la modalità "P", è possibile limitare la potenza al minimo, indispensabile durante determinati trattamenti parodontici.

Vantaggi

- Tecnologia iPiezo engine
- Design compatto
- Pannello di controllo intuitivo, di facile utilizzo



Varios 570 Set completo

Con luce	MODELLO	CODICE
●	VA570 LUX	Y1001273

Contenuto

- Unità di controllo con cordone
- Adattatore AC
- Manipolo
- Set di filtri per l'acqua
- Pedale di controllo (FC-70)
- 3 punte Scaling
- Chiave dinamometrica con limitatore di Torque

Specifiche tecniche

- Alimentazione: AC 100V-240V 50/60 Hz
- Frequenza: 28-32 KHz
- Potenza max in uscita: 11 W (modalità G)
- Dimensioni: L160 x P135 x H65 (mm)
- Peso unità: 0.43 kg

Varios 370

Ablatore ultrasonico multifunzionale portatile

Varios 370 è stato progettato per essere installato su qualsiasi riunito grazie alla sua forma compatta. Facile da utilizzare, si adatta a molteplici applicazioni cliniche: "P" (Perio), "E" (Endodonzia) e "G" (Generale).



Vantaggi

- Tecnologia iPiezo engine
- Unità compatta e portatile
- Pannello di controllo intuitivo, di facile utilizzo

Varios 370, esempi di installazione



Sul braccio del riunito con staffa (opzionale)



Sopra o sotto il vassoio di appoggio con specifico supporto dell'unità



Varios 370 Set completo

Con luce	MODELLO	CODICE
—	VA370	Y1001340

Contenuto

- Unità di controllo con cordone
- Supporto unità di controllo
- Adattatore AC
- Manipolo
- Supporto manipolo
- Set di filtri per l'acqua
- Pedale di controllo (FC-71)
- 3 punte Scaling (G4, G6, G8)
- Chiave dinamometrica con limitatore di Torque

Specifiche tecniche

- Alimentazione: AC 100V-240V 50/60 Hz
- Frequenza: 28-32 KHz
- Potenza max in uscita: 11 W (modalità G)
- Dimensioni: L80 x P115 x H32 (mm) (senza cordone)
- Peso unità: 0.43 kg (senza attacco)

Varios 170

Dimensioni ridotte per una facile installazione su ogni tipo di riunito

Varios 170 è il sistema integrato più piccolo sul mercato, dotato della tecnologia iPiezo engine che assicura una potenza stabile in uscita. Il manipolo, comodo e leggero, con doppia illuminazione LED, può essere aggiunto all'unità e controllato dal pedale.



Cassetta di sterilizzazione

Il manipolo, le punte e la chiave dinamometrica possono essere sterilizzati insieme.



Varios 170 Set completo

Con luce	MODELLO	CODICE
●	VA170LUXS8	Y1004145
—	VA170S8	Y1004144

Contenuto


- Modulo integrato • Manipolo • Cordone • 3 punte Scaling (G4, G8, G16)
- Chiave dinamometrica con limitatore di Torque (3 pz) • Cassetta di sterilizzazione

Specifiche tecniche


- Alimentazione: AC 24 V ±10%
- Frequenza: 28-32 KHz
- Potenza max in uscita: 11 W
- Dimensioni: L 63 x P 54 x H 26 mm
- Peso unità: 59 g

Ultrasonic Scaler Tips

NSK offre un'ampia gamma di punte ultrasoniche Varios per ogni applicazione clinica

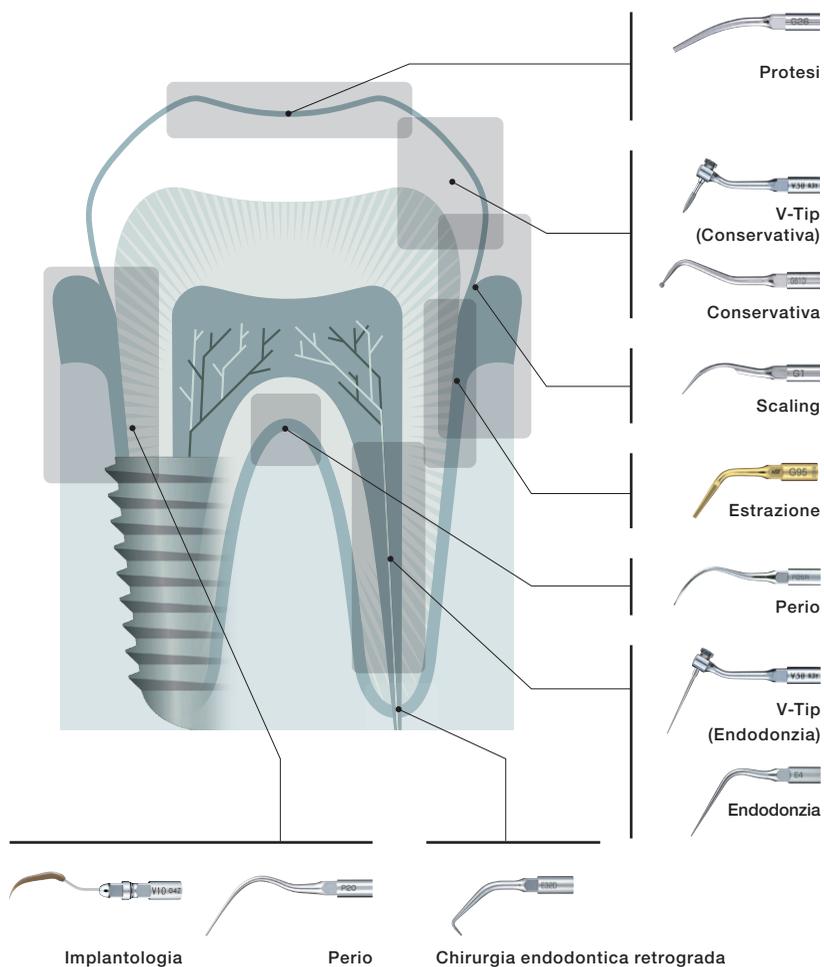

Le punte Varios sono compatibili con i manipoli degli ablatori ultrasonici Varios2 e Satelec®. NSK produce inoltre alcuni inserti compatibili con gli ablatori ultrasonici EMS®. A seguito una pratica guida che illustra le diverse compatibilità.

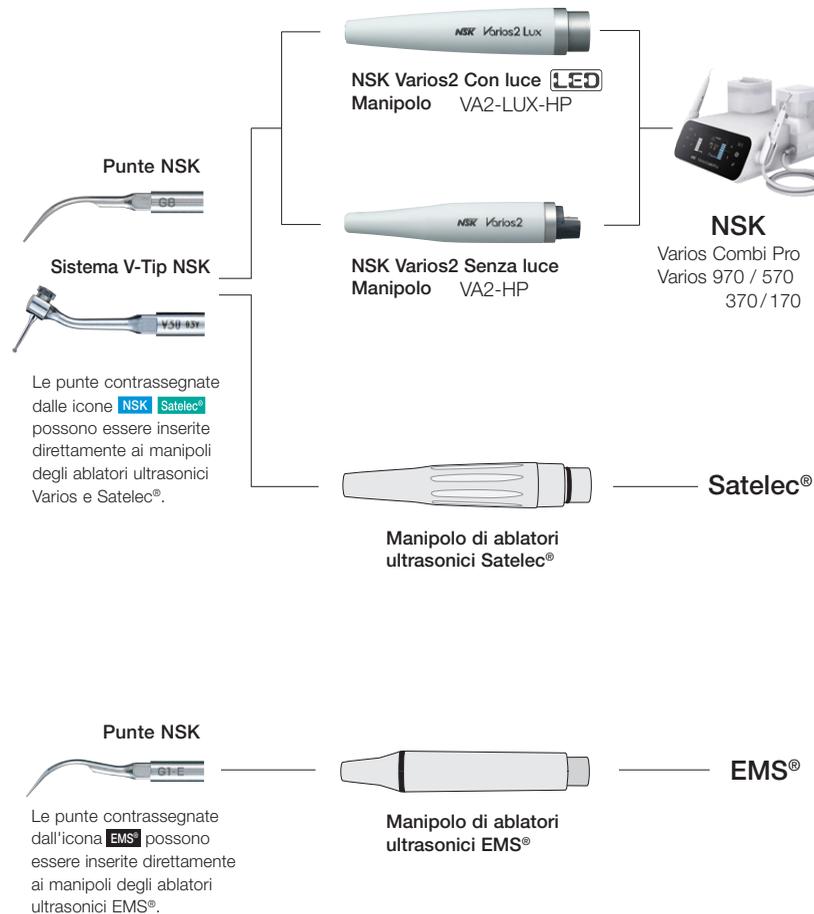

Scaling

Sezione della punta				MODELLO	CODICE
				NSK Satelec® G1	Z217101
				EMS* G1-E	Z291101
				NSK Satelec® G2	Z217102
				EMS* G2-E	Z291102
				NSK Satelec® G3	Z217103
				EMS* G3-E	Z291103
				NSK Satelec® G4	Z217104
				EMS* G4-E	Z291104
				NSK Satelec® G5	Z217105
				NSK Satelec® G6	Z217106
				EMS* G6-E	Z291106
				NSK Satelec® G8	Z217108
				NSK Satelec® G9	Z217109
				NSK Satelec® G11	Z217411

Scaling

Sezione della punta				MODELLO	CODICE
				NSK Satelec® G12	Z217412
				NSK Satelec® G13	Z217413
				NSK Satelec® G16	Z217120

Perio (Root planing)

Sezione della punta				MODELLO	CODICE
				NSK Satelec® P1	Z217404
				NSK Satelec® P1D	Z217405
				• Punta diamantata	
				NSK Satelec® P2D	Z217402
				• Punta diamantata • Curvatura a destra	
				NSK Satelec® P3D	Z217403
				• Punta diamantata • Curvatura a sinistra	

Perio (Root planing)

Sezione della punta

MODELLO	CODICE
  	P10 Z217410
• Punta affilata	
MODELLO	CODICE
  	P11R Z217408
• Punta affilata • Curvatura a destra	
MODELLO	CODICE
  	P11L Z217409
• Punta affilata • Curvatura a sinistra	
MODELLO	CODICE
  	P20 Z217420
  	P20-E Z291420
MODELLO	CODICE
  	P21R Z217422
  	P21R-E Z291422
• Curvatura a destra	
MODELLO	CODICE
  	P21L Z217421
  	P21L-E Z291421
• Curvatura a sinistra	

Perio (Root planing)

Sezione della punta

MODELLO	CODICE
  	P25R Z217424
  	P25R-E Z291424
• Curvatura a destra	
MODELLO	CODICE
  	P25L Z217425
  	P25L-E Z291425
• Curvatura a sinistra	
MODELLO	CODICE
  	P26R Z217426
• Curvatura a destra	
MODELLO	CODICE
  	P26L Z217427
• Curvatura a sinistra	

Perio (Irrigazione e Detersione)

Sezione della punta

MODELLO	CODICE
  	P40 Z217550
• Punta ø0.6 mm	
MODELLO	CODICE
  	P41 Z217555
• Punta ø0.8 mm	

Implantologia (V-Tip) Perio-Control



Supporto per V-Tip



MODELLO	CODICE
V10	Z217041

- Include chiave di sostituzione punte E
- Punta in plastica non inclusa

Punte per la cura di protesi ed impianti, prodotte con un materiale speciale che permette di effettuare il trattamento di debridement in totale sicurezza, senza danneggiare le superfici metalliche e gli impianti.

Sezione della punta



MODELLO	CODICE
V-P10	Y900184

- Conf. da 3 pz
- Supporto V10 non incluso

La punta V-P12 è la versione più lunga della punta V-P10. La sua forma favorisce l'accesso a tutte le aree della cavità orale e soddisfa molteplici applicazioni.



MODELLO	CODICE
V-P12	Y1002167

- Conf. da 3 pz
- Supporto V10 non incluso



V-P10



V-P12



V-P11R



V-P26R

Implantologia (V-Tip)

Le punte V-P11R/L hanno una doppia curvatura. Queste punte sono ultra lunghe in modo da favorire l'accesso nelle aree difficili da raggiungere ed evitare interferenze con i denti prossimi. La loro forma è stata progettata per meglio adattarsi alle diverse morfologie dei denti, risultando così estremamente versatili per molteplici applicazioni, dagli anteriori ai premolari.

Sezione della punta



MODELLO	CODICE
V-P11R	Y1002165

- Curvatura a destra
- Conf. da 3 pz
- Supporto V10 non incluso



MODELLO	CODICE
V-P11L	Y1002166

- Curvatura a sinistra
- Conf. da 3 pz
- Supporto V10 non incluso

Le punte V-P26R/L hanno un'ampia angolazione che permette di trattare le aree di difficile accesso, impossibili da raggiungere con le punte V-P11R/L o con altri strumenti tradizionali. Queste punte sono ideali per le superfici distali dei molari e per zone angolari in quanto la loro estremità si adatta perfettamente alla morfologia del dente.



MODELLO	CODICE
V-P26R	Y1002168

- Curvatura a destra
- Conf. da 3 pz
- Supporto V10 non incluso



MODELLO	CODICE
V-P26L	Y1002169

- Curvatura a sinistra
- Conf. da 3 pz
- Supporto V10 non incluso

Endodonzia

Sezione della punta



MODELLO	CODICE
E4	Z217428
<ul style="list-style-type: none"> • Per rimozione di frammenti 	
MODELLO	CODICE
E4D	Z217528
<ul style="list-style-type: none"> • Diamantata • Per ampliamento del canale radicolare 	
MODELLO	CODICE
E5	Z217305
<ul style="list-style-type: none"> • Irrigazione non necessaria • Per condensazione laterale 	
MODELLO	CODICE
E6	Z217306
<ul style="list-style-type: none"> • Irrigazione non necessaria • Per condensazione laterale 	
MODELLO	CODICE
E7	Z217307
<ul style="list-style-type: none"> • Irrigazione non necessaria • Per rimozione di frammenti 	
MODELLO	CODICE
E7D	Z217317
<ul style="list-style-type: none"> • Diamantata • Per ampliamento del canale radicolare 	


Endodonzia

Sezione della punta



MODELLO	CODICE
E8	Z217308
<ul style="list-style-type: none"> • Irrigazione non necessaria • Per rimozione di frammenti 	
MODELLO	CODICE
E8D	Z217318
<ul style="list-style-type: none"> • Diamantata • Per ampliamento del canale radicolare 	
MODELLO	CODICE
E15D	Z217319
<ul style="list-style-type: none"> • Diamantata • Per localizzare i canali radicolari e la rimozione di calcificazioni 	

* L'immagine della sezione della punta è relativa alla sezione calcolata ad 1 mm dalla fine. La sezione illustrata è 3 volte più grande rispetto alle dimensioni reali.

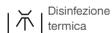

* Per le punte E5, E6, E7, E7D, E8 e E8D utilizzare la specifica chiave di sostituzione punte inclusa.



Endodonzia

Supporto con angolazione 120° per lime U



* Lima opzionale.

Supporto con angolazione 95° per lime U



* Lima opzionale.



MODELLO	CODICE
E11	Z217031

- Per lime U (o 0.8 mm)
- Per detersione canale radicolare
- Per anteriori • Il file è facoltativo

MODELLO	CODICE
E12	Z217032

- Per lime U files (o 0.8 mm)
- Per detersione canale radicolare
- Per posteriori
- Il file è facoltativo

MODELLO	CODICE
Lima U 33 mm / # 15 Y900062	

- ISO15 • Conf. da 6 pz

MODELLO	CODICE
Lima U 33 mm / # 20 Y900063	

- ISO20 • Conf. da 6 pz

MODELLO	CODICE
Lima U 33 mm / # 25 Y900064	

- ISO25 • Conf. da 6 pz

MODELLO	CODICE
Lima U 33 mm / # 30 Y900065	

- ISO30 • Conf. da 6 pz


MODELLO	CODICE
Lima U 33 mm / # 35 Y900066	

- ISO35 • Conf. da 6 pz

Ogni confezione di punta E11, E12 e V30 include 1 chiave di sostituzione punta E. Questa chiave non è inclusa nelle confezioni delle altre punte, quindi va ordinata separatamente.


Consultare la tabella per garantire la corretta lunghezza della lima, al fine di evitare rotture.

	#15	#20	#25	#30	#35
E11	22 mm	24.5 mm	22 mm	22 mm	22 mm
E12	22 mm	24.5 mm	24.5 mm	24.5 mm	22 mm

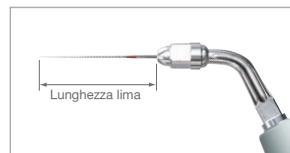

Endodonzia retrograda

Sezione della punta

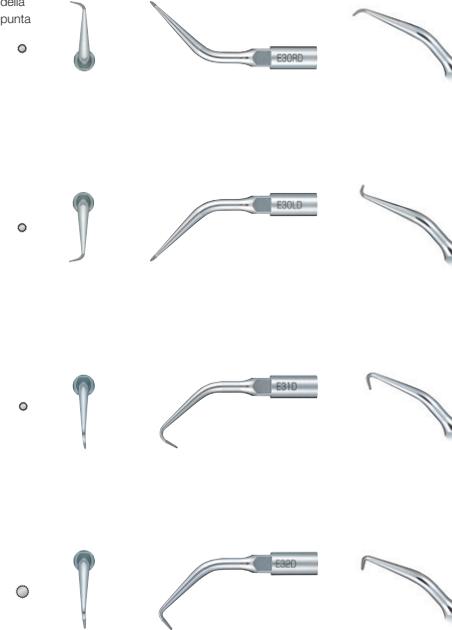

MODELLO	CODICE
E30RD	Z217212

- Diamantata
- Per posteriori (angolazione a destra)

MODELLO	CODICE
E30LD	Z217213

- Diamantata
- Per posteriori (angolazione a sinistra)

MODELLO	CODICE
E31D	Z217210

- Diamantata
- Per anteriori e posteriori (70°)

MODELLO	CODICE
E32D	Z217211

- Diamantata • Per anteriori (90°)

* L'immagine della sezione della punta è relativa alla sezione calcolata ad 1 mm dalla fine. La sezione illustrata è 3 volte più grande rispetto alle dimensioni reali.



Disinfezione termica



Autoclavabile a max 135°C



Disinfezione termica



Autoclavabile a max 135°C

Estrazione

La punta G95 con doppia estremità e molto affilata e quindi può essere inserita senza eccessiva forzatura. Inoltre, considerando che l'abrasione dei legamenti parodontali crea un spazio tra la superficie radicolare del dente e l'osso alveolare, l'estrazione del dente può essere eseguita senza arrecare danni all'osso che circonda la radice.

Caratteristiche

- Miglior accesso all'area chirurgica grazie alla sommità sottile della punta e all'estremità affilate.
- Rimozione delicata dell'area di adesione della membrana parodontale.
- Estrazione delicata del dente a vantaggio di un miglior confort del paziente.
- Possibilità di trattare anche quelle aree difficili da raggiungere con gli strumenti manuali.

Estrazione radice (rimozione dente superiore sinistro No. 2)

L'estrazione del dente è possibile senza eliminare un'eccessiva porzione di osso alveolare intorno alla radice, preservando così la morfologia dell'osso alveolare.



Dente danneggiato (rimozione del dente inferiore sinistro No. 8)

L'utilizzo della punta prima dell'estrazione rende instabile il dente, rendendo così più facile la procedura di estrazione.



Attenzione a non utilizzare una forza eccessiva.
Nishikawa-guchi dental clinic



MODELLO	CODICE
G95	Z217705

- Rivestimento TiN
- Spessore 0.7 mm
- Doppia estremità affilata in tre direzioni

Conservativa (Per micro-conservativa)

				<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELLO</th> <th>CODICE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G61D</td> <td>Z217601</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Diamantata 	MODELLO	CODICE	G61D	Z217601
MODELLO	CODICE							
G61D	Z217601							
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELLO</th> <th>CODICE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G62D</td> <td>Z217602</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Diamantata 	MODELLO	CODICE	G62D	Z217602
MODELLO	CODICE							
G62D	Z217602							
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELLO</th> <th>CODICE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G65D</td> <td>Z217605</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Diamantata 	MODELLO	CODICE	G65D	Z217605
MODELLO	CODICE							
G65D	Z217605							
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELLO</th> <th>CODICE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G66D</td> <td>Z217606</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Diamantata 	MODELLO	CODICE	G66D	Z217606
MODELLO	CODICE							
G66D	Z217606							
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELLO</th> <th>CODICE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G67D</td> <td>Z217607</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Diamantata 	MODELLO	CODICE	G67D	Z217607
MODELLO	CODICE							
G67D	Z217607							
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELLO</th> <th>CODICE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G68D</td> <td>Z217608</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Diamantata 	MODELLO	CODICE	G68D	Z217608
MODELLO	CODICE							
G68D	Z217608							

Condensazione



MODELLO	CODICE
G21	Z217010

- Irrigazione non necessaria
- Per anteriori
- 3 cappucci inclusi



MODELLO	CODICE
G22	Z217020

- Irrigazione non necessaria
- Per posteriori
- 3 cappucci inclusi



MODELLO	CODICE
Tip Cap	Y140751

- Autoclavabile
- Per punta G21 / G22 (Conf. da 10 pz)

Levacorone / Plugging



MODELLO	CODICE
G26	Z217206

- Per rimozione perni



MODELLO	CODICE
G28	Z217208

- Irrigazione non necessaria
- Per condensazione amalgama

Varios V-TIP System



Il sistema di supporto Varios V-Tip è innovativo, multifunzionale ed economico. Il supporto V-Tip è un componente separato dalle punte e può essere facilmente sostituito. Grazie alla sua flessibilità, il sistema di supporto V-Tip permette di soddisfare molteplici applicazioni cliniche.

Conservativa

P.130-131

• Per micro-conservativa

• Per finitura / lucidatura

• Per rimozione carie




Endodonzia

P.129

• Per detersione canale radicolare

• Per ampliamento canale radicolare

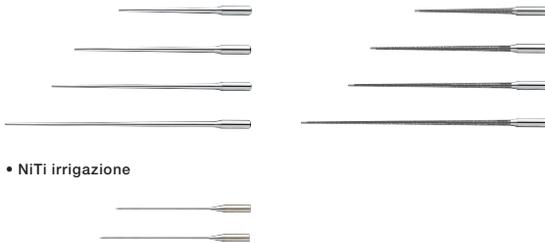

• NiTi irrigazione



Implantologia

P.118-119

• Per protesi o impianti



V30

Angolazione 120°



V10

Diritto

Endodonzia V-Tip



Supporto per V-Tip



MODELLO	CODICE
V30	Z217030

*Punta opzionale.

• Per detersione canale radicolare 17 mm • Conf. da 3 pz

MODELLO	CODICE
V-S50	Y900169

• Per detersione canale radicolare 23 mm • Conf. da 3 pz

MODELLO	CODICE
V-S51	Y900170

• Per detersione canale radicolare 26 mm • Conf. da 3 pz

MODELLO	CODICE
V-S52	Y900171

• Per detersione canale radicolare 32 mm • Conf. da 3 pz

MODELLO	CODICE
V-S53	Y900172

• Per detersione canale radicolare 17 mm • Conf. da 3 pz.

• Diamantata

MODELLO	CODICE
V-S50D	Y900173

• Per detersione canale radicolare 23 mm • Conf. da 3 pz.

• Diamantata

MODELLO	CODICE
V-S51D	Y900174

• Per ampliamento canale radicolare 26 mm • Conf. da 3 pz.

• Diamantata

MODELLO	CODICE
V-S52D	Y900175

• Per ampliamento canale radicolare 32 mm • Conf. da 3 pz.

• Diamantata

MODELLO	CODICE
V-S53D	Y900176

• NiTi irrigazione 17 mm • Conf. da 3 pz.

MODELLO	CODICE
V-N50	Y900182

• NiTi irrigazione 21 mm • Conf. da 3 pz.

MODELLO	CODICE
V-N51	Y900183



* Nessun rivestimento diamantato sull'estremità della punta (1 mm) al fine di ridurre la formazione di sporgenze.

Ogni confezione di punta E11, E12 e V30 include 1 chiave di sostituzione punte E. Questa chiave non è inclusa nelle confezioni delle altre punte, quindi va ordinata separatamente.

Conservativa (per micro-conservativa)



Supporto per V-Tip



MODELLO	CODICE
V30	Z217030

- Punta opzionale.

ø0.97



MODELLO	CODICE
V-G70	Y900118

- Diamantata • Conf. da 3 pz

ø1.4



MODELLO	CODICE
V-G71	Y900119

- Diamantata • Conf. da 3 pz

ø1.6



MODELLO	CODICE
V-G72	Y900120

- Diamantata • Conf. da 3 pz

0.6



MODELLO	CODICE
V-G75	Y900121

- Diamantata • Conf. da 3 pz

0.9



MODELLO	CODICE
V-G76	Y900122

- Diamantata • Conf. da 3 pz

Ogni confezione di punta E11, E12 e V30 include 1 chiave di sostituzione punte E. Questa chiave non è inclusa nelle confezioni delle altre punte, quindi va ordinata separatamente.

Conservativa (per finitura / lucidatura)



Supporto per V-Tip



MODELLO	CODICE
V30	Z217030

- Punta opzionale.


5.0
ø1.2



MODELLO	CODICE
V-G77	Y900165

- Diamantata • Normale
- Conf. da 3 pz


5.0
ø1.2

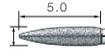

MODELLO	CODICE
V-G78	Y900166

- Diamantata • Fine
- Conf. da 3 pz

5.0
ø1.2

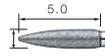

MODELLO	CODICE
V-G79	Y900167

- Diamantata • Super Fine
- Conf. da 3 pz

Conservativa (per rimozione carie)



Supporto per V-Tip



MODELLO	CODICE
V30	Z217030

- Punta opzionale.

0.9
ø0.8



MODELLO	CODICE
V-S1	Y900161

- Punta in Acciaio inossidabile
- Conf. da 3 pz

1.2
ø1.1



MODELLO	CODICE
V-S3	Y900162

- Punta in Acciaio inossidabile
- Conf. da 3 pz

2.6
ø0.8



MODELLO	CODICE
V-S33	Y900163

- Punta in Acciaio inossidabile
- Conf. da 3 pz

Kit

Applicazione Perio



MODELLO	CODICE
Perio Kit A	Y900144

Contenuto

- P1D, P2D, P3D, P10: 1 pz cad
- 1 supporto punte

Applicazione Perio

Forcazione di superfici curve



MODELLO	CODICE
Perio Kit B	Y900145

Contenuto

- P20, P25R, P25L: 1 pz cad
- 1 supporto punte

Applicazione Perio

Per protesi e impianti



MODELLO	CODICE
Perio-Control Starter Kit	Y1002606

Contenuto

- 1 supporto punte V10
- V-P11R, V-P11L, V-P12, V-P26R, V-P26L: 1 pz cad
- 1 chiave di sostituzione punte E

Applicazione Endodonzia

Per irrigazione canale radicolare anteriore



Include 5 tipologie di lime U (ø0.8 mm) più supporto a 120°

MODELLO	CODICE
Kit Endo E11	Y900146

Contenuto

- 1 punta E11, angolazione 120° per anteriori
- 1 chiave di sostituzione punte E
- Lime U 33 mm #15, #20, #25, #30, #35 conf. da 6 pz ogni misura

Kit

Applicazione Endodonzia

Per irrigazione canale radicolare posteriore



Include 5 tipologie di lime U (ø0.8 mm) più supporto a 95°

MODELLO	CODICE
Endo Kit E12	Y900147

Contenuto

- 1 punta E12, angolazione 95° per posteriori
- 1 chiave di sostituzione punte E
- Lime U 33 mm #15, #20, #25, #30, #35: conf. da 6 pz ogni misura

Applicazione Endodonzia

4 tipi di punte per chirurgia retrograda



MODELLO	CODICE
Kit Retro	Y900149

Contenuto

- E30RD, E30LD, E31D, E32D: 1 pz per modello
- 1 supporto punte

Applicazioni Microchirurgia

Starter kit per intervento mini o con supporto per punte tipo V



MODELLO	CODICE
MI Starter Kit	Y900150

Contenuto

- Supporto punte V, V30: 1 pz
- Chiave di sostituzione punte E: 1 pz
- V-G70, V-G71, V-G72: 1 pz cad
- V-S1, V-S3, V-S33: 1 pz cad
- V-G77, V-G78, V-G79: 1 pz cad

Ti-Max S970




Evoluzione dell'Air Scaler per un maggior numero di trattamenti

Air Scaler Ti-Max S970 permette di selezionare numerosi livelli di potenza ed offre un'ampia gamma di punte per numerose applicazioni cliniche, da quelle per ablazione ed irrigazione canalare a quelle per trattamenti minimamente invasivi. Grazie al corpo ergonomico e alla sua versatilità, Ti-Max S970 è lo strumento ideale sia per dentisti che per igienisti. Il corpo in titanio, leggero e resistente, ed il design sottile rendono Ti-Max S970 particolarmente apprezzato durante interventi prolungati, garantendo un'eccellente visibilità dell'area di lavoro.


Potenza sempre stabile

Ti-Max S970 assicura una potenza stabile a tutti i livelli per mantenere un costante movimento di oscillazione, circa 6,000 Hz. Ti-Max S970 è particolarmente indicato per pazienti con denti e tessuti parodontali sensibili.

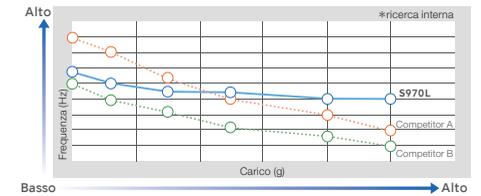

Eccellente visibilità

Il design sottile di Ti-Max S970 permette la massima visibilità ed un accesso facilitato, anche nelle zone difficili da raggiungere.

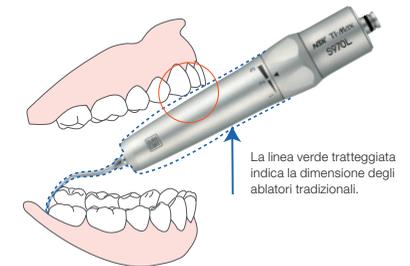

Anello di regolazione della potenza

L'anello di regolazione offre 3 diversi livelli di frequenza in base al tipo di applicazione clinica. La modalità più bassa è indicata per procedure delicate, mentre per applicazioni Scaling è consigliabile selezionare una potenza maggiore.



Applicazioni	Punte	Regolazione di potenza		
		1	2	3
Scaling	S1, S2, S3	←→→→		
Perio	S10, S20, S21R, S21L	←→→		
Perio (Implantologia)	S35+V-Tip (V-P10, V-P11R, V-P11L, V-P12)	←→→		
Conservativa (Preparazione corone)	S81D, S82D, S83D, S86D, S71D, S72D	←→→		
Conservativa (Per micro-Conservativa)	S65D, S66D, S67D, S68D	←→→		
V-TIP SYSTEM (Endodonzia)	S75+V-Tip (V-U15-V-U35)	←→		

Il livello di potenza indicato sopra è standard. Si prega di iniziare da un livello basso in base ai sintomi evidenziati.

Ti-Max S970



- Corpo in Titanio con trattamento DURACOAT antigraffio
- Anello di regolazione potenza con 3 livelli
- Frequenza di oscillazione: 5,800-6,200 Hz
- Fibre ottiche Cellular Glass



3 punte incluse (S1, S2, S3),
chiave per punte (CR-20) e
coperchio punta (L)

Attacco NSK

Con luce	MODELLO	CODICE
●	S970L	T1005
—	S970	T1020

Attacco KaVo®

Con luce	MODELLO	CODICE
●	S970KL	T1013

Attacco Sirona®

Con luce	MODELLO	CODICE
●	S970SL	T1015

AS2000

- Frequenza di oscillazione: 5,600~5,850 Hz
- 3 punte incluse (S1, S2, S3), chiave per punte (CR-20) e coperchio punta (L)



Con luce	MODELLO	CODICE
—	AS2000 M4	T698

- Per Midwest 4 vie • Peso: 67 g



Con luce	MODELLO	CODICE
—	AS2000 B2/3	T697

- Per Borden 2/3 vie • Peso: 64 g

Air Scaler Tips

Scaling

Sezione della punta



MODELLO CODICE

S1 **Z252411**

- Tipo Universale



MODELLO CODICE

S2 **Z252413**

- Tipo a Falce



MODELLO CODICE

S3 **Z252412**

- Tipo Perio

Perio

Sezione della punta



MODELLO CODICE

S10 **Z252420**

- Tipo Universale sottile



MODELLO CODICE

S20 **Z252441**

- Root Planning (diritta)



MODELLO CODICE

S21R **Z252442**

- Root Planning (curvatura a destra)



MODELLO CODICE

S21L **Z252443**

- Root Planning (curvatura a sinistra)

Implantologia (V-Tip)



Supporto per V-Tip



MODELLO CODICE

S35 **Z252015**

- Chiave per punte E inclusa
- Punta di plastica non inclusa

Sezione della punta



MODELLO CODICE

V-P10 **Y900184**

- Conf. da 3 pz
- Supporto S35 non incluso



MODELLO CODICE

V-P12 **Y1002167**

- Conf. da 3 pz
- Supporto S35 non incluso



MODELLO CODICE

V-P11R **Y1002165**

- Curvatura a destra
- Conf. da 3 pz
- Supporto S35 non incluso



MODELLO CODICE

V-P11L **Y1002166**

- Curvatura a sinistra
- Conf. da 3 pz
- Supporto S35 non incluso

Kit Air Scaler



MODELLO CODICE

Kit Perio-Control **Y1002754**

- Supporto S35: 1 pz
- V-P10, V-P11R, V-P11L, V-P12: 1 pz per modello
- Chiave per punte E inclusa

Conservativa (Per micro-Conservativa)

A differenza degli strumenti rotanti, queste punte oscillano e tagliano solo una parte di superficie, assicurando preparazioni minimamente invasive e riducendo il rischio di danneggiare i denti prossimali e i tessuti molli. La forma sferica di queste punte favorisce la rimozione della carie nell'area cervicale ed interprossimale.



MODELLO	CODICE
S65D	Z252465

• Diamantata



MODELLO	CODICE
S66D	Z252466

• Diamantata



MODELLO	CODICE
S67D	Z252467

• Diamantata




MODELLO	CODICE
S68D	Z252468


• Diamantata



S65D

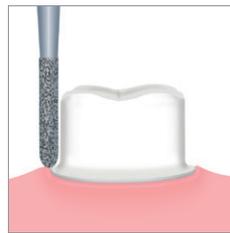

S81D

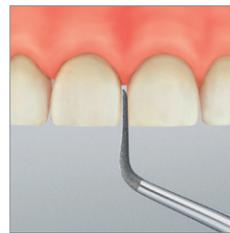

S72D

Conservativa (Preparazione corone)

Queste punte sono indicate per la rifinitura dei margini a seguito di preparazione dell'area con frese tradizionali. A differenza degli strumenti rotanti, queste punte permettono la rifinitura dei margini acuti e dei solchi gengivali senza alcun danno. Sono disponibili tre tipi di punte in base al livello di smussatura.



MODELLO	CODICE
S81D	Z252469

• Diamantata



MODELLO	CODICE
S82D	Z252462

• Diamantata



MODELLO	CODICE
S83D	Z252461

• Diamantata



MODELLO	CODICE
S86D	Z252460

• Diamantata

Queste punte presentano un lato piatto e non tagliente per interventi poco invasivi a livello mesiale o distale.



MODELLO	CODICE
S71D	Z252471

• Diamantata



MODELLO	CODICE
S72D	Z252472

• Diamantata

V-TIP System



Il sistema V-Tip NSK è innovativo, multifunzionale ed economico. Il supporto per V-Tip è un componente separato rispetto alle attuali punte e può essere integrato in modo semplice ed economico. Il sistema di supporto V-Tip NSK permette una maggior flessibilità per rispondere in maniera puntuale ad una sempre più ampia tipologia di applicazioni cliniche.


Endodonzia (V-Tip)



Supporto per V-Tip



Endodonzia P.145

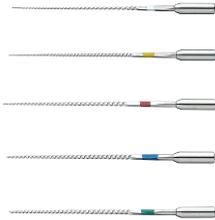

S75
Angolazione 120°

Implantologia P.141

• Per Protesi o Implantologia



S35
Diritto

MODELLO	CODICE
S75	Z252035

- Chiave per punte E inclusa

MODELLO	CODICE
V-U15	Y900177

- Lima V irrigazione 23 mm #15
- ISO15 • Conf. da 6 pz

MODELLO	CODICE
V-U20	Y900178

- Lima V irrigazione 23 mm #20
- ISO20 • Conf. da 6 pz

MODELLO	CODICE
V-U25	Y900179

- Lima V irrigazione 23 mm #25
- ISO25 • Conf. da 6 pz

MODELLO	CODICE
V-U30	Y900180

- Lima V irrigazione 23 mm #30
- ISO30 • Conf. da 6 pz

MODELLO	CODICE
V-U35	Y900181

- Lima V irrigazione 23 mm #35
- ISO35 • Conf. da 6 pz

Prophy-Mate neo



Prophy-Mate neo, il miglior strumento di lucidatura per bellissimi denti bianchi

La lucidatura a polvere sopragengivale è altamente efficace se usata in combinazione con FLASH pearl. L'esclusivo ugello NSK consente di ottenere un potente getto di erogazione della polvere. Il manipo- lo lungo e sottile in abbinamento alla piccola punta dell'ugello, migliora notevolmente l'accessibilità intorno a tutta la superficie del dente. La pulizia può essere eseguita rapidamente anche in aree interprossimali e in zone di solito difficili da raggiungere. Il design ergonomico dell'impugnatura è comodo da maneggiare e garantisce agile operatività.

Polvere di pulizia migliorata

L'originale sistema di ugelli NSK rafforza l'efficacia della polvere sbiancante. Il potente getto riduce notevolmente i tempi di pulizia e di trattamento.



Prima



Dopo



Facile rimozione dei puntali da 60° e 80°

È possibile scegliere tra il puntale da 60° e 80° di angolazione. Il puntale a 80° è indicato per l'area dei molari, invece quello da 60° per i denti anteriori.



Facile rotazione di 360°

Gli attacchi del manipo- lo possono ruotare di 360° per una maggiore funzionalità, adattandosi così in maniera flessibile anche ai più piccoli movimenti delle dita e assicurando al tempo stesso una corretta regolazione di angolazione.




Collegamento in un solo gesto

Prophy-Mate neo è stato progettato per garantire il collegamento diretto con un solo e semplice gesto agli attacchi delle turbine, sia NSK che degli altri maggiori marchi presenti sul mercato.



Prophy-Mate neo

Sbiancatore ad aria a bicarbonato

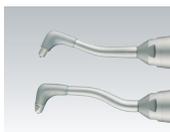

Puntali da 60° e 80°



Prophy-Mate neo Gamma Completa

	MODELLO	CODICE
Attacco NSK	PMNG-PTL-P	Y135029
Attacco KaVo®	PMNG-KV-P	Y135030
Attacco Sirona®	PMNG-SR-P	Y135031
W&H®Roto Quick	PMNG-WH-P	Y135032
Bien-Air® Unifix®	PMNG-BA-P	Y135033
Connessione diretta MIDWEST	PMNG-M4-P	Y135034
Connessione diretta BORDEN	PMNG-B2-P	Y135035

■ Attacchi non inclusi

Contenuto

- Manipolo con puntale da 60° • Coperchio per serbatoio polvere • Puntale da 80°
- 5 bustine di polvere di bicarbonato FLASH pearl da 15 g cad • Kit di manutenzione

FLASH pearl

POLVERE DI PULIZIA

Vantaggi

- Potente • Risultati rapidi
- Azione delicata • Priva di Sodio
- Biodegradabile, non ostruisce



MODELLO	CODICE
FLASH pearl	Y900693

- Pratico confezionamento
- Contiene 100 buste da 15 g cad

MODELLO	CODICE
FLASH pearl (flacone)	Y900698

- Contiene 4 flaconi
- Tappo con misurino
- Flacone da 300 g

Eccezionale pulizia con polvere delicata

Non salata! La polvere ha un impatto minore a causa del sapore delicato e fornisce ai pazienti una delicata pulizia della superficie dentale. Il segreto di una pulizia intensa e di una finitura liscia? Particelle sferiche a base di calcio. La polvere fine con granuli di dimensione media di 54µm, rotola sul dente limitando i danni alla superficie e rimuove rapidamente placca e macchie. Il trattamento "FLASH pearl" è efficace in sedute brevi, così che il paziente risulta incoraggiato a programmare sedute di pulizia regolari.

Risultati sempre scintillanti

FLASH pearl, polvere di bicarbonato per Prophy-Mate neo, è una polvere a particelle sferiche ideata per scorrere delicatamente sulla superficie dei denti e penetrare in ogni angolo per una rapida pulizia. La forma sferica dei granuli di polvere diminuisce la possibilità di danneggiare dente e tessuti molli consentendo la rimozione di macchie, placca e tartaro velocemente e in tutta sicurezza.

■ Le reazioni avverse a questo prodotto sono rare



Sistema efficiente di pulizia

Perio-Mate



Ampia gamma di applicazioni che vanno dall'uso sopragengivale a quello subgengivale

Beccuccio in plastica flessibile per un miglior accesso nelle tasche con delicatezza

Il sottile beccuccio è dotato di un'ottima flessibilità che permette di passare delicatamente sulla superficie dei denti ed essere inserito all'interno di tasche strette e superfici radicolari di denti adiacenti senza causare alcun disagio ai pazienti.




Design del beccuccio progettato per una perfetta circolazione della polvere nelle tasche

L'esperienza acquisita da NSK nella fluidodinamica in fase di progettazione e sviluppo delle turbine tiene conto delle difficoltà tipiche dell'operatore che opera in spazi limitati come le tasche.



Puntale sottile per una migliore accessibilità negli spazi ridotti della cavità orale

Il puntale dal design lungo e sottile permette un facile accesso nelle aree sottogengivali o dove è necessario posizionare il manipolo ad angolo, come per esempio tra i molari.

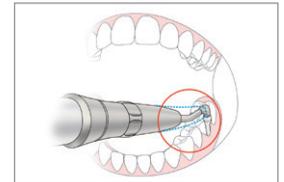

Rotazione di 360° per interventi precisi e sicuri

Il manipolo può essere ruotato manualmente anche durante operazioni complesse. Il puntale garantisce un facile accesso alle aree di difficile raggiungimento, senza danneggiare i denti e i tessuti vicini.



Anello di controllo erogazione

L'anello di controllo dell'erogazione della polvere favorisce lo scorrimento della stessa in modo semplice ed intuitivo tramite una semplice rotazione manuale. Questo permette di controllare e bloccare il flusso in modo semplice ed immediato, potendo ripulire l'intera area senza interruzioni.



Facile manutenzione

Il puntale, il beccuccio, il manipolo e il contenitore della polvere possono essere facilmente smontati per essere puliti e decontaminati.



Perio-Mate

Rimozione biofilm



Perio-Mate Gamma completa

	MODELLO	CODICE
Attacco NSK	PER-PTL-P	Y1002654
Attacco KaVo® LED	PER-KV-P	Y1002655
Attacco Sirona® LED	PER-SR-P	Y1002656
W&H® Roto Quick	PER-WH-P	Y1002657
Bien-Air® Unifix®	PER-BA-P	Y1002658
Connessione diretta MIDWEST	PER-M4-P	Y1002659
Connessione diretta BORDEN	PER-B2-P	Y1002660


Contenuto

- Manipolo • Serbatoio polvere • Beccucci (40 pz) • 1 flacone polvere Glicina (160 g)
- Kit di manutenzione

Perio Mate Powder

Comparazione tra particelle di polvere

Perio-Mate è la polvere sottile ideale per il trattamento di tasche parodontali

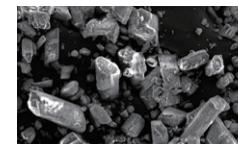

Tradizionale polvere di bicarbonato di sodio


Diametro medio della particella: 73 µm Immagine ingrandita 150 volte a mezzo microscopio a scansione elettronica



Polvere Perio-Mate (a base di glicina)

Diametro medio della particella: 25 µm Immagine ingrandita 150 volte a mezzo microscopio a scansione elettronica

Riduzione della carica batterica

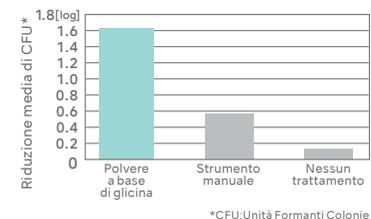

L'azione di Air polishing della polvere Perio-Mate (a base di glicina) risulta particolarmente significativa nella riduzione della carica batterica rispetto alla tradizionale rimozione manuale della placca.

Petersilka GJ, Tunkel J, Barakos K, Heinecke A, Häberlein I, Flemmig TF. Subgingival plaque removal at interdental sites using a low-abrasive air polishing powder. J Periodontol. 2003 Mar;74(3): 307-11.

Vantaggi

- Polvere per la pulizia sottogengivale
- Ingrediente principale è la glicina, un aminoacido presente nelle proteine
- Altamente solubile in acqua, per evitare ritenzione subgengivale
- Durezza inferiore alla dentina nella scala di Mohs. La glicina raggiunge livello 2 nella scala di Mohs, la dentina si posiziona tra il 2 e il 2,5
- Diametro medio delle particelle di polvere 25 µm

MODELLO	CODICE
Polvere Perio-Mate	Y900938

- Conf. da 2 flaconi • Flacone da 160 g



Perio-Mate beccuccio



MODELLO	CODICE
Perio-Mate beccuccio	Y1002741

- Contenuto: 40 beccucci

iProphy

Riprendi il controllo nelle tue mani




Leggero e semplice da impugnare

Progettato e sviluppato per offrire le più innovative caratteristiche ergonomiche. Il manipo, semplice da impugnare e ben bilanciato, è leggero da utilizzare anche per trattamenti di lucidatura relativamente lunghi.

La testina ultra mini permette di avere un campo visivo senza ostacoli

La testina ultra mini permette di avere un campo visivo senza ostacoli. Permette di eseguire il trattamento in modo ancora più semplice e preciso.

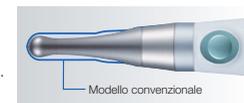

Leggero e semplice da impugnare Semplice controllo della potenza

Il controllo della potenza a portata di mano. Non occorre usare i comandi a pedale, iProphy mantiene facilmente le basse velocità di rotazione, un'operazione difficile per i contrangoli standard.

Interfaccia utente semplice e chiara

L'interfaccia utente intuitiva consente di svolgere la procedura in tranquillità. I tasti di accensione/spengimento sono grandi e semplici da premere.



iProphy TESTINE



- Per profilassi
- Per coppette a vite
- Per angoli prophy monouso

	MODELLO	CODICE
Riduttore 4:1	iFX57	C1102
Riduttore 4:1	PR-F	H209



iProphy set completo

MODELLO	CODICE
iProphy set completo (230V)	Y1500015

- Contenuto:**
- Manipo a motore di iProphy
 - Testina iFX57
 - Supporto di iProphy
 - Adattatore CA
 - Beccuccio spray tipo F

iProphy senza testina

MODELLO	CODICE
iProphy senza testina	Y1500069

- Contenuto:**
- Manipo a motore di iProphy
 - Supporto di iProphy
 - Adattatore CA
 - Beccuccio spray tipo F